

Vor Inbetriebnahme des Dreirad Rollers "Libra" ist folgendes zu beachten:

1. Die Achsschrauben, welche zum Getriebe führen (rechts wie links), sind auf Festigkeit zu überprüfen.
2. Die Schrauben von der Bremsscheibe vorne sind auf Festigkeit zu überprüfen.
3. Die Bremsen hinten sollten ein- bzw. nachgestellt werden.
4. Die Beleuchtungseinheit sowie sämtliche Schalteinheiten sind auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.
5. Vor Übergabe des Fahrzeuges sollte eine Probe- bzw. Funktionsfahrt von einer technisch versierten Person vorgenommen werden.
6. das Lenkradschloß ist auf Funktion zu prüfen.
7. die Ladefunktion des Ladegerätes ist zu prüfen.
8. der Reifendruck ist auf 2,5 bis 3 bar zu füllen.